

急な発熱や寝苦しい時に




商品の特長

- シャーベットジェル(凍らないジェル)と凍結ジェルの2種類のジェルパックを採用。
 〈シャーベットジェル〉冷凍庫に入れてもやわらかいのでオデコにぴったりフィットします。
 〈凍結ジェル〉冷却持続効果を高めます。
- 肌触りの良いタオル地の布カバーはバンドの長さが調節可能なので、家族全員で使用できます。
- パソコン等で疲れた時や熱中症対策にも最適です。
- くり返しご使用になれます。
- 冷却時間は1～2時間です。※(外気温や使用環境により持続時間は異なります)

⚠[使用上の注意]

- 発熱が続く時は医師に相談してください。
- 自分で使うことが困難な方(乳幼児、身体の不自由な方等)が使用する時には、保護者などの監督のもとで十分に注意して使用してください。

- 【ご使用方法】**
- (1) 2種類のジェルパックを冷凍庫に水平に置き、3時間以上冷やします。
 - (2) ジェルパックを2枚重ねて、下図のように布カバーに入れてください。
 - (3) ゴムバンド部分はアタッチメントで長さを調節できます。

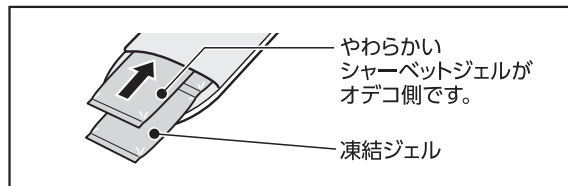

保管及び取扱い上の注意

- 本品は食べられません。万一、中身を食べてしまった時は水を多量に飲ませるか吐かせる等の処置をし、すぐに医師に相談してください。
- 冷却したジェルパックを肌に直接当てると凍傷になる恐れがあるので、必ず付属の布カバーに入れて使用してください。
- 電子レンジ等で温めて使用しないでください。
- 2つ折りにして使用しないでください。
- 中身が目に入った時、皮膚に付着した時はすぐに水で洗い流し、異常がある時は医師に相談してください。
- 破損した時は使用を中止してください。中身が漏れてシーツなどについた時は布などで拭き取り、その後よく水洗いしてください。
- かたいもの、鋭利なものに接触させたり、乱暴(落とす、激しくもむ、踏みつける等)に扱わないでください。
- 直射日光の当たらない温度の低いところに保管してください。
- 廃棄の際は自治体の区分に従って分別ゴミとして捨ててください。

《包装》1個

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元 **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)