

急な発熱や寝苦しい時に冷やす

# デコデコクール熱とり枕

冷凍庫で  
冷やすタイプ

## 商品の特長

- 上層の凍らないソフトジェルは冷凍庫（-20℃）に入れても柔らかいままなので、頭にフィットしてしっかり冷却します。
  - 3層構造（凍らないソフトジェル・冷却時間を持続させるハードジェル・断熱シート）が冷却持続効果を高めます。
  - くり返しご使用になれます。
  - 冷却時間は6～10時間です。（外気温や使用環境により持続時間は異なります）
- ※冷凍庫から取り出した商品を付属の枕カバーで巻き、28℃の室温中で商品本体の温度が25℃になるまでの時間を測定

## ⚠️【使用上の注意】

- 本品は食べられません。万一、中身を食べてしまった時は水を多量に飲ませるか吐かせる等の処置をし、すぐ医師に相談してください。
- 発熱が続く時は医師に相談してください。
- 冷却したジェルパックを肌に直接当てると凍傷になる恐れがありますので、必ずタオル等で巻いて使用してください。
- 自分で使うことが困難な方（乳幼児、身体の不自由な方等）が使用する時には、保護者などの監督のもとで十分に注意して使用してください。
- 電子レンジ等で温めて使用しないでください。
- 中身が目に入った、皮膚に付着した時はすぐに水で洗い流し、異常がある時は医師に相談してください。
- 破損した時は使用を中止してください。中身が漏れてシートなどについた時は布などで拭き取り、その後よく水洗いをしてください。
- かたいもの、鋭利なものに接触させたり、乱暴（落とす、激しくもむ、踏みつける等）に扱わないでください。
- 直射日光の当たらない温度の低いところに保管してください。
- 廃棄の際は自治体の区分に従って分別ゴミとして捨ててください。

## 【ご使用方法】

- 冷凍庫に水平に置き8時間以上冷やし、タオル等で巻いて使用してください。

《包装》1個

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00～17:50（土日・祝日・会社休日を除く）