

貼って冷やせる冷却シート

ByeBye-FEVER®

バイバイフィーバー®

商品の特長

発熱時のおでこの冷却に。

首スジやワキの下などに貼ってカラダを冷やす。

- ピッタリフィット、はがれにくい。
- 10時間の冷却テストクリア(当社試験結果より)。
- お肌にやさしい(弱酸性)。
- 微香性。

⚠️[使用上の注意]

- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜等のお肌の弱い部位。
 - 湿疹、かぶれ、傷口等の皮膚に異常のある部位。
- お肌に合わないときや、発疹・発赤、かゆみ等の異常があらわれた場合にはすぐに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
- 乳幼児や自分で使うことが困難な方へのご使用の際は、保護者または看護者の監督のもと、食べたり、口や鼻への貼りつきによる窒息事故などが起きないように、十分にご注意ください。
- 皮膚に汗やパウダー等がついているときは、貼りつきが悪くなりますので、よくふいてからご使用ください。また、貼り直しを繰り返すと、はがれの原因になりますので、なるべく貼り直さずにご使用ください。
- 開封後は冷却効果が徐々に低下していきますので、なるべく早めにご使用ください。
- 一度ご使用になったシートは、衛生上および機能上お使いにならないでください。

本品は医薬品ではありませんので、熱さましの補助具などとしてご使用ください。発熱が続く場合には、医師又は薬剤師にご相談されることをおすすめします。

- 【ご使用方法】**
- 透明フィルムをはがし、ジェル面を冷やしたい部位に貼ってください。
 - 冷蔵庫などで冷やしてから使うと、より冷却効果が得られます。(冷凍庫には入れないでください)
 - 使用部位に応じて、ハサミで適当な大きさに切ってご使用ください。

保管上の注意

- 未使用のシートは袋に入れ、開封口を実線に沿って2回しっかりと折り曲げ、未使用分が外気に触れないようにしてください。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。
- 子供の手のとどかない所に保管してください。

パラベン、色素、香料配合

《包装》大人用(5cm×13cm)……………6枚入
 こども用(5cm×11cm)……………6枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00—17:50(土日・祝日・会社休日を除く)