

首すじ、おデコに



**商品の特長**

- 4連の凍結ジェルパックを採用。冷却時間は約2時間\*持続します。  
※外気温や使用環境により持続時間は異なります。
- 色々な部位に巻いてご使用ください。  
首すじ、おデコ、ふくらはぎ等に  
  - 大きな布カバー 長さ約70cm、幅6cmを採用。
  - サラサラ布カバー 肌触りのよい布カバーを採用。
- くりかえしご使用になれます。  
冷凍庫で凍らせて、ご使用ください。

**⚠️[使用上の注意]**

- 本品は食べられません。万一、中身を食べてしまった時は水を多量に飲ませるか吐かせる等の処置をし、すぐに医師に相談してください。
- 発熱が続く時は医師に相談してください。
- 冷却したジェルパックを肌に直接当てると凍傷になる恐れがあるので、必ず付属の布カバーに入れて使用してください。冷たすぎる場合はタオルなどで包んで、ご使用ください。
- 自分で使うことが困難な方(乳幼児、身体の不自由な方等)が使用する時には、保護者などの監督のもとで十分に注意して使用してください。カバーが引っかかって首を絞める恐れがあります。
- 循環器系疾患(高血圧・低血圧・狭心症等)の方は医師に相談の上ご使用ください。
- 電子レンジ等で温めて使用しないでください。
- 2つ折りにして使用しないでください。
- 中身が目に入った時、皮膚に付着した時はすぐに水で洗い流し、異常がある時は医師に相談してください。
- 破損した時は使用を中止してください。中身が漏れてシーツなどについた時は布などで拭き取り、その後よく水洗いしてください。
- かたいもの、鋭利なものに接触させたり、乱暴(落とす、激しくもむ、踏みつける等)に扱わないでください。
- 直射日光の当たらない温度の低いところに保管してください。
- 廃棄の際は自治体の区分に従って分別ゴミとして捨ててください。

- 【ご使用方法】**
- (1) ジェルパックを冷凍庫に水平に置き、3時間以上冷やします。
  - (2) ジェルパックを、右図のように布カバーに入れてください。
  - (3) 面ファスナーで、長さを調整して装着してください。



《包装》1個

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)