

貼って冷やせる冷却シート

Bye Bye FEVER® **赤ちゃん用** **バイバイフィーバー**® **0～2才向け**

商品の特長

お肌が敏感な赤ちゃんの急な発熱を冷やすおでこ救急シートです。

- 弱酸性で無香料・無着色なので、肌にやさしく、かぶれにくいシートです。
- 心地よい冷却感が約8時間持続します。
- 誤って食べてしまわないように、苦味成分を配合しています。
- 赤ちゃんのおでこにピッタリのサイズで、寝返りをうってもずれ落ちません。

⚠️【使用上の注意】

- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜等のお肌の弱い部位。
 - 湿疹、かぶれ、傷口等の皮膚に異常のある部位。
- お肌に合わないときや、発疹・発赤、かゆみ等の異常があらわれた場合にはすぐに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
- 乳幼児や自分で使うことが困難な方へのご使用の際は、保護者または看護者の監督のもと、食べたり、口や鼻への貼りつきによる窒息事故などが起きないように、十分にご注意ください。
- 皮膚に汗やパウダー等がついているときは、貼りつきが悪くなりますので、よくふいてからご使用ください。また、貼り直しを繰り返すと、はがれの原因になりますので、なるべく貼り直さずにご使用ください。
- 開封後は冷却効果が徐々に低下していきますので、なるべく早めにご使用ください。
- 一度ご使用になったシートは、衛生上および機能上お使いにならないでください。

- 【ご使用方法】 ●透明フィルムをはがし、ジェル面を冷やしたい部位に貼ってください。
- 冷蔵庫などで冷やしてから使うと、より冷却効果が得られます。(冷凍庫には入れないでください)
 - 使用部位に応じて、ハサミで適当な大きさに切ってご使用ください。

保管上の注意

- 未使用のシートは袋に入れ、開封口を実線に沿って2回しっかりと折り曲げ、未使用分が外気に触れないようにしてください。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。
- 子供の手のとどかない所に保管してください。

本品は医薬品ではありませんので、熱さましの補助具などとしてご使用ください。
 発熱が続く場合には、医師又は薬剤師にご相談されることをおすすめします。

パラベン配合

《包装》12枚入(4cm×8cm)

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)