

シップ剤の固定に便利
サロンパスQQ-BOX®
シップ。メイト®


商品の特長

- サロンパスQQ-BOX「シップメイト」は、通気性にすぐれた不織布に刺激の少ない粘着剤を塗布し、シップ剤やガーゼ等を固定するために開発された商品です。
- 通気性にすぐれ、カブレにくいです。
- 適度な伸縮性があり、屈伸部位にもピッタリ固定できます。

指・手首



ひざ

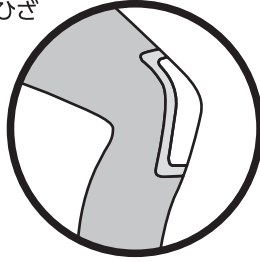


足首



⚠️【使用上の注意】

- 本品の使用により、発疹・発赤（腫脹）、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- 粘膜、湿疹、かぶれ、傷口に直接貼らないでください。

【ご使用方法】

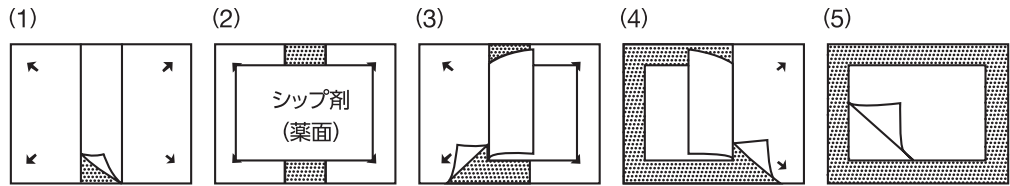

(1) 粘着シートの真中の細い裏紙をはがしてください。


(2) 薬面を上にしシップ剤の角を↑印に合わせ、真中の粘着部分を固定します。

(3) シップ剤の片側をもちあげ粘着シートの裏紙をはがしシップ剤を固定します。


(4) もう一方も同じように裏紙をはずし、シップ剤をしっかりと固定します。

(5) シップ剤の薬面のプラスチックフィルムをはがし、患部にお貼りください。

- シップメイトは適当な大きさに切っても使えます。

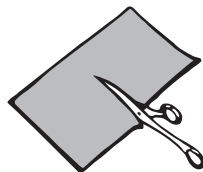

患部に応じて適当な大きさにカットして使えます。

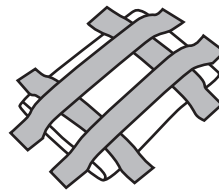

小さく切って普通の絆創膏のような使い方もできます。

《包装》14cm × 18cm …………… 6枚入

▼ 本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00—17:50（土日・祝日・会社休日を除く）