

Hisamitsu アイシングシート

商品の特長

スポーツの後のリフレッシュしたい足(ふくらはぎやふとももなど)、肩、手首、首筋などに!
※本品は医薬品ではありません。水分が蒸発する気化熱を利用して冷却するシートです。

1. すぐれた冷却力と持続力
高含水ジェル基剤と特殊な基布によりすぐれた冷却力が長く持続する貼る冷却シートです。
2. 巻いて貼ったり、長く貼ったり自由自在
5cm×20cmのサイズですので、いろいろな部位に巻いて、貼って冷やすことができます。
3. さわやかな使用感
微香性ミントの香りで爽やかで気持ちいい使用感です。
4. 保湿チャック付き
中袋には、保管に便利な保湿チャックがついて、アイシングシートの乾燥を防ぎます。

使用方法

1. 表面の透明フィルムをはがして、冷やしたい部分にお貼りください。
2. 冷蔵庫等で適度に冷やした後、ご使用になるとさらに効果的です。(冷凍庫には入れないでください。)
3. 汗をかいているときは、よく拭いてから貼ってください。
4. 本品は衛生上、1回限りの使用としてください。

⚠[使用上の注意]

1. 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等。
(2)湿疹、かぶれ、傷口。
2. 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、皮膚科医等へ相談してください。
3. 本品は食べられません。
4. 乳幼児、小児、身体が不自由な人など、ご自分で使うことが困難な方に使用させる場合は、保護者または看護者の監督のもと、十分に注意して使用させてください。

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。

《包装》5cm×20cm……………3枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)