

リハビリテーション医学理論の「ガード構造」でぐらつき抑制!

フェイス

ひざ用

メディカルサポーター

〈左右共用〉


商品の特長

- リハビリテーション用装具(補助器具)の「支柱(副え木)」から発想した、独自の「ガード構造」!
チタン合金配合素材の「チタンガード」採用




●「チタンガード」採用

競泳用の“高速水着”と同じ製法で作られた、「薄く、軽く、頑丈な」チタン合金配合素材「チタンガード」を採用。この「チタンガード」をひざの上下左右に使用することで、ひざ関節をしっかりと圧迫・保温し、ズレを抑え、ひざ関節のぐらつきを抑制します。

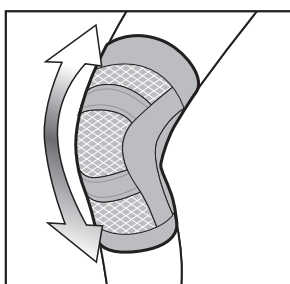

●超薄・伸縮素材

薄さ約0.6mmの通気性に優れた「超薄・伸縮素材」を、ひざの前面に採用。ひざ関節にフィットし、快適な動きやすさを実現。

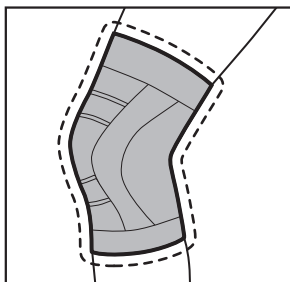


●屈曲デザイン

ひざを少し曲げた角度で縫製した「屈曲デザイン」なので、曲げることの多いひざ関節にフィットし、曲げ伸ばしもスムーズです。

⚠️ [使用上の注意]

- ねんざ、骨折、傷、湿疹などの異常や末梢血行障害のある人、化繊やゴム素材などにアレルギーのある人は使用しないでください。
- ひざ以外の部位には使用しないでください。
- サイズの合わないものは使用しないでください。
- 就寝中は使用しないでください。
- 痛み、かぶれ、傷、うっ血など身体に異常を感じた場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 長時間の使用ならびに使用状況によって、破損や接着部のズレが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 機能のあらわれ方には個人差があります。

【着用方法】 (1) 「フェイス」のタグが見えるように持ちます。

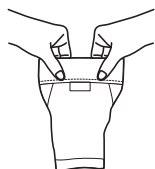

(2) 製品を足に通します。靴下のようにたぐり寄せて、手の平でたくし上げるように履くと履きやすくなります。



(3) チタンガードが、正面のお皿の上下にくるように装着してください。




(4) たるみがでないようにしっかり伸ばしてください。



【サイズの選び方】

	ひざ頭周囲
S	30 ~ 34cm
M	33 ~ 37cm
L	36 ~ 40cm
LL	39 ~ 43cm

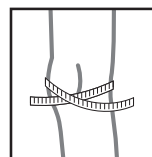

イラストのように
ひざ頭周囲を測ってください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 火の近くや高温になる場所には置かないでください。
- 製品の特性上、部分的に強い力が加わったり、爪などで引っ掛けると、引きつれたり、破れる恐れがありますのでご注意ください。
- 着用中、摩擦等により他のものに色移りすることがあります。
- 洗濯に際して、表示されている内容をご確認ください。
- 洗濯には中性洗剤をご使用ください。
- 洗濯中、色落ちすることがありますので、白または淡色物とは別に洗ってください。
- アイロン、塩素系洗剤は使用しないでください。
- タンブラー乾燥はお避けください。

【洗濯表示】



品質表示：ポリエステル、ナイロン、その他(クロロプレナム使用)

《包装》ひざ用 Sサイズ …………… 1枚入
 ひざ用 Mサイズ …………… 1枚入
 ひざ用 Lサイズ …………… 1枚入
 ひざ用 LLサイズ …………… 1枚入

From the maker of **Salonpas®**

MADE IN JAPAN

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元 **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)