

リハビリテーション医学理論の「ガード構造」でしっかりサポート!

フェイス

メディカルサポーター

ふくらはぎ用

〈 左右共用 〉

商品の特長

- リハビリテーション用装具(補助器具)の「支柱(副え木)」から発想した、独自の「ガード構造」!
チタン合金配合素材の「チタンガード」採用



●「チタンガード」採用

競泳用の“高速水着”と同じ製法で作られた、「薄く、軽く、頑丈な」チタン合金配合素材「チタンガード」を採用。この「チタンガード」をふくらはぎの左右に使用することでふくらはぎをしっかりとさみこんで圧迫・保温し、筋肉の動きをサポートします。



●超薄・伸縮素材

薄さ約0.6mmの通気性に優れた「超薄・伸縮素材」を、前面と背面に採用。優れたフィット性と、快適な動きやすさを実現しました。




●薄型設計

全てのパーツに薄い素材を使用した「薄型設計」なので、ごわつきを抑え、衣服の下に着用しても気になりません。

⚠️ [使用上の注意]

- ねんざ、骨折、傷、湿疹などの異常や末梢血行障害のある人、化繊やゴム素材などにアレルギーのある人は使用しないでください。
- ふくらはぎ以外の部位には使用しないでください。
- サイズの合わないものは使用しないでください。
- 就寝中は使用しないでください。
- 痛み、かぶれ、傷、うっ血など身体に異常を感じた場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 長時間の使用ならびに使用状況によって、破損や接着部のズレが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 機能のあらわれ方には個人差があります。

【着用方法】 (1) 「フェイス」のタグが見えるように持ちます。

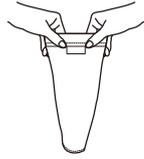

(2) 製品を足に通します。靴下のようにたぐり寄せて、手の平でたくし上げるように履くと履きやすくなります。



(3) 「フェイス」のタグが後ろの上にくるように装着してください。




(4) たるみがでないようにしっかり伸ばしてください。



【サイズの選び方】

	ふくらはぎ周り
M	33 ~ 38cm
L	38 ~ 43cm

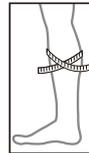


イラストのようにふくらはぎの一番太い部分の周囲を測ってください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 火の近くや高温になる場所には置かないでください。
- 製品の特性上、部分的に強い力が加わったり、爪などで引っ掛けると、引きつれたり、破れる恐れがありますのでご注意ください。
- 着用中、摩擦等により他のものに色移りすることがあります。
- 洗濯に際して、表示されている内容をご確認ください。
- 洗濯には中性洗剤をご使用ください。
- 洗濯中、色落ちすることがありますので、白または淡色物とは別に洗ってください。
- アイロン、塩素系洗剤は使用しないでください。
- タンブラー乾燥は避けください。

【洗濯表示】

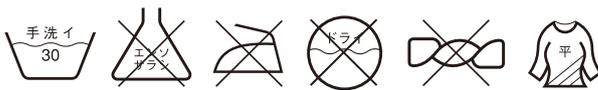

品質表示：ナイロン、ポリウレタン、その他(クロロプレンゴム使用)

《包装》ふくらはぎ用 Mサイズ …………… 1枚入
ふくらはぎ用 Lサイズ …………… 1枚入

From the maker of **Salonpas®**

MADE IN JAPAN

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)