

ひざまわりにフィット!曲げ伸ばしをしっかりとサポート!

フェイス® ひざ用

アクティブサポーター 〈左右共用〉

商品の特長

●二重着圧構造でひざ周りをサポート!



●二重着圧構造

異なる2種の素材がひざ周りを二重で圧着しながらひざを支えます。



●超薄伸縮素材

薄くて伸縮性に優れた素材で快適な着け心地。



●ひざ裏メッシュ


通気性の良いメッシュ素材がひざ裏のムレを軽減。

⚠️ [使用上の注意]

- ねんざ、骨折、傷、湿疹などの異常や末梢血行障害のある人、化繊やゴム素材などにアレルギーのある人は使用しないでください。
- ひざ以外の部位には使用しないでください。
- サイズの合わないものは使用しないでください。
- 就寝中は使用しないでください。
- 痛み、かぶれ、傷、うっ血など身体に異常を感じた場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 長時間の使用ならびに使用状況によって、破損や接着部のズレが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 機能のあらわれ方には個人差があります。

【着用方法】

(1) 円い穴の開いた面を前にして持ちます。

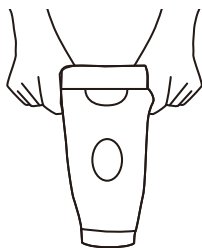

(2) 製品を足に通します。靴下のようにたぐり寄せて履くと履きやすくなります。




(3) ひざのお皿がサポーター円の中心にくるように装着します。



【サイズの選び方】

	ひざ頭周囲	ひざ頭周から10cm上の周囲
S	30 ~ 34cm	35 ~ 39cm
M	33 ~ 37cm	38 ~ 42cm
L	36 ~ 40cm	41 ~ 45cm
LL	39 ~ 43cm	44 ~ 48cm

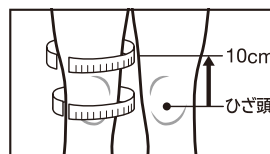

イラスト部位を計測してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 火の近くや高温になる場所には置かないでください。
- 製品の特性上、部分的に強い力が加わったり、爪などで引っ掛けると、引きつれたり、破れる恐れがありますのでご注意ください。
- 着用中、摩擦等により他のものに色移りすることがあります。
- 洗濯に際して、表示されている内容をご確認ください。
- 洗濯には中性洗剤をご使用ください。
- 洗濯中、色落ちすることがありますので、白または淡色物とは別に洗ってください。
- 手絞りの場合は弱く、遠心脱水機の場合は短時間で行ってください。

【洗濯表示】



品質表示：ポリエステル、ナイロン、その他

《包装》ひざ用 Sサイズ …………… 1枚入
ひざ用 Mサイズ …………… 1枚入
ひざ用 Lサイズ …………… 1枚入
ひざ用 LLサイズ …………… 1枚入

MADE IN JAPAN

ROICA

この商品には、ストレッチ性に優れ、体に心地よくフィットするプレミアムストレッチファイバー(ロイカ)を使用しています。ROICA®(ロイカ®)は旭化成(株)の登録商標です。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの小売店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)