

腰まわりにフィット!ラクに動けて長時間しっかりサポート!


# フェイス

腰用

アクティブサポーター


## 商品の特長

- 超薄伸縮素材で腰周りを長時間快適サポート

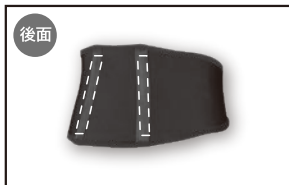


- ダブルボーン構造

2つのバックボーン構造により腰をしっかりサポートします。

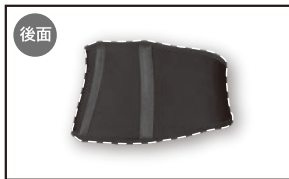

- 超薄伸縮素材

薄くて伸縮性に優れた素材で快適な着け心地。

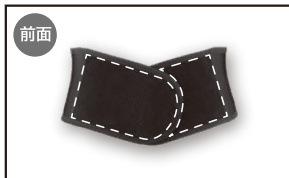


- 幅広面ファスナー

通気性のよい幅広面ファスナーなので快適に腹部を包み込みます。

## ⚠ [使用上の注意]


- 打撲、傷、湿疹などの異常や末梢血行障害のある人、化繊やゴム素材などにアレルギーのある人は使用しないでください。
- 妊娠中または妊娠の可能性のある人は使用しないでください。
- 腰以外の部位には使用しないでください。
- サイズの合わないものは使用しないでください。
- サポーターの内側にカイロを入れて使用しないでください。
- 就寝中は使用しないでください。
- 痛み、かぶれ、傷、うっ血など身体に異常を感じた場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 長時間の使用ならびに使用状況によって、破損や接着部のズレが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 肌の敏感な人は、下着の上から使用してください。
- 機能のあらわれ方には個人差があります。

【着用方法】 (1) 「フェイス®」の文字が内側の上になるように持ちます。

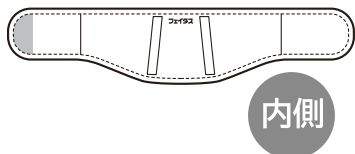


内側

(2) サポーターを後ろにまわし、腰骨にかぶる高さに合わせ、左右均等の長さになるように引っ張ります。

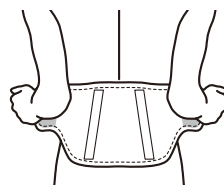


(3) 左側からしっかりと前に引き、右側を上重ねて面ファスナーが前下がりになるように装着します。

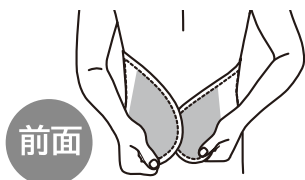

前面


(4) たるみがないようにしっかり伸ばしてください。

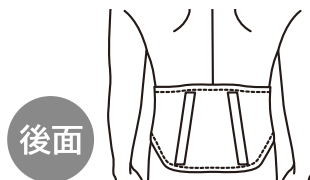

後面

### 【サイズの選び方】

	腰周り・へそ下
M	66 ~ 81cm
L	80 ~ 95cm
LL	94 ~ 109cm

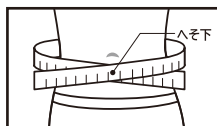

イラスト部位を計測してください。

### 【保管及び取り扱い上の注意】

- 火の近くや高温になる場所には置かないでください。
- 製品の特性上、部分的に強い力が加わったり、爪などで引っ掛けると、引きつれたり、破れる恐れがありますのでご注意ください。
- 着用中、摩擦等により他のものに色移りすることがあります。
- 洗濯に際して、表示されている内容をご確認ください。
- 洗濯の際は、面ファスナーをとめて洗濯してください。
- 洗濯には中性洗剤をご使用ください。
- 洗濯中、色落ちすることがありますので、白または淡色物とは別に洗ってください。
- 手絞りの場合は弱く、遠心脱水機の場合は短時間で行ってください。

### 【洗濯表示】



品質表示：ナイロン、ポリウレタン、その他

《包装》腰用 Mサイズ …………… 1枚入  
腰用 Lサイズ …………… 1枚入  
腰用 LLサイズ …………… 1枚入

MADE IN JAPAN



この商品には、ストレッチ性に優れ、体に心地よくフィットするプレミアムストレッチファイバー(ロイカ)を使用しています。ROICA®(ロイカ®)は旭化成(株)の登録商標です。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの小売店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)