

スポーツ時に筋肉に沿って貼るテープ  
**キネシオロジーテープ**  
Kinesiology Tape  
(東京2020パラリンピックマスコット)

**商品の特長**

- あらかじめ25cmサイズにカットされているので、剥離紙をはがすだけで簡単に貼れます。
- 円が連なった形状なので関節等の凹凸部位にもしっかり密着します。

**用途** キネシオロジーテープ**ご使用方法**

- ①皮膚が伸びている状態を維持し、テープを貼るラインを決める
- ②テープの裏の剥離紙を引っ張ってちぎる ※折り目をつけると簡単にちぎれます
- ③貼り始める位置を決め、テープを引っ張らず置くように貼っていく
- ④円のフチをやさしくなぞるように肌に密着させていく
- ⑤はがれないように上からしっかり押さえつける

**使用上の注意**

- 皮膚を清潔にし、よく乾かしてからご使用ください。
- 粘着テープ類によるかぶれ、アレルギー症状のある人や、傷口、皮膚炎には直接使用しないでください。
- 使用中に発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、すぐに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

**その他の使用上の注意**

- 本品は固定用テーピングではありません。
- 用途外での使用はお避け下さい。
- 摩擦により、特に濡れた状態では色移りする場合がありますのでご注意ください。

**保管及び取扱い上の注意**

- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 湿気が少なく涼しい場所、直射日光が当たらない場所に保管してください。

【素材】綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤

《包装》5枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp/help/>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)