


ふわっとして、ぴったりフィット！快適な着け心地！

貼り薬の不織布で作ったマスク

(耳掛けタイプ)

商品の特長

- 三層構造でウイルス飛沫や花粉をブロック!
- 貼り薬にも使用されている不織布
- 立体形状で呼吸がしやすい
- すっきりとしたシルエット
- ふわっとした肌ざわり
- ふわっとした伸縮素材で耳が痛くなりにくい
- ほおにもフィット

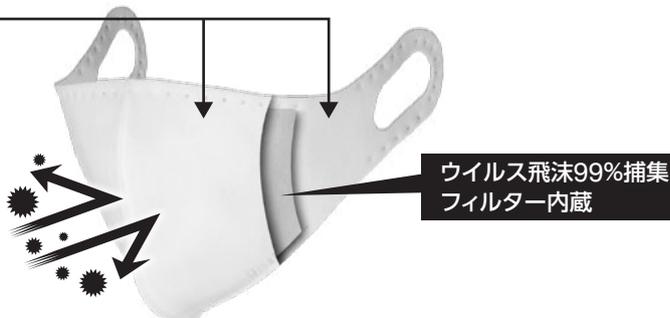


[フィルター捕集効率試験 平均値] VFE(ウイルス飛沫ろ過効率)試験:99%カット、PFE(微粒子捕集効率)試験:99%カット、BFE(バクテリア飛沫ろ過)試験:99%カット、花粉粒子のろ過効率試験:99%カット

⚠️ [使用上の注意]


- 本品は、有害粉塵・有害ガス等の発生する場所での使用や、それらを防ぐ目的には使用できません。
- 本品は使い切り商品ですので、洗濯しての再利用はしないでください。
- 乳幼児や呼吸器に異常のある方は使用しないでください。
- 息苦しさを感じた場合は使用を中止してください。
- 皮膚に異常がある場合や、かゆみ・かぶれなどの症状があらわれた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- ニオイにより気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
- 耳かけ部分を強く引っ張るとゆるくなることがあります。
- 火気のそばでは使用しないでください。
- 眼鏡がくもることがありますので、運転の際などは十分に注意してください。

【使用方法】

- ①マスクの上下を確認してください。
Hisamitsuマークのある先の長い方が
下(あご側)になります。

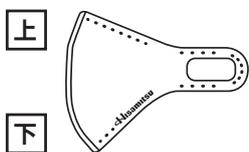

- ②マスクを広げ、
耳に掛けてご使用ください。

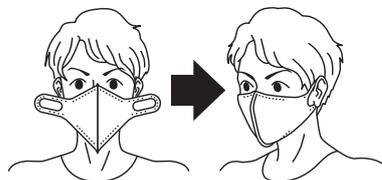

保管上の注意

- 直射日光の当たらない、涼しい場所に保管してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

《包装》ふつうサイズ …………… 5枚入
小さめサイズ …………… 5枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造・販売者名  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)