

ふわっとして、ぴったりフィット！ 快適な着け心地！

# 貼り薬の不織布で作ったマスク

(貼るタイプ)

## 商品の特長

- 三層構造でウイルス飛沫や花粉をブロック!
- 貼り薬にも使用されている不織布
- 立体形状で呼吸がしやすい
- すっきりとしたシルエット
- ふわっとした肌ざわり
- ほおにもフィット




[フィルター捕集効率試験 平均値] VFE(ウイルス飛沫ろ過効率)試験:99%カット、PFE(微粒子捕集効率)試験:99%カット、BFE(バクテリア飛沫ろ過)試験:99%カット、花粉粒子のろ過効率試験:99%カット

## ⚠️【使用上の注意】


- 本品は、有害粉塵・有害ガス等の発生する場所での使用や、それらを防ぐ目的には使用できません。
- 本品は使い切り商品ですので、洗濯しての再利用はしないでください。
- 乳幼児や呼吸器に異常のある方、皮膚が敏感でかぶれやすい方は使用しないでください。
- 息苦しさを感じた場合は使用を中止してください。
- 皮膚に異常がある場合や、かゆみ・かぶれなどの症状があらわれた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- 使用後は皮膚に負担をかけないようにゆっくりとはがしてください。
- 体毛の多い箇所や汗・ファンデーションなどにより十分な粘着力が得られない場合があります。
- ニオイにより気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
- 火気のそばでは使用しないでください。
- 眼鏡がくもることがありますので、運転の際などは十分に注意してください。

## 【使用方法】

- ①マスクの上下を確認してください。  
先の長い方が下(あご側)  
 になります。

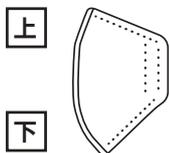

- ②剥離紙をはがし、両手で顔の中央にマスクがくるようにあて、ゆっくりと貼ってください。

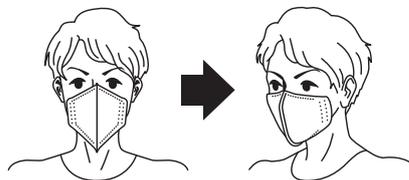

## 保管上の注意

- 直射日光の当たらない、涼しい場所に保管してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

《包装》ふつうサイズ …………… 3枚入  
 小さめサイズ …………… 3枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造・販売者名  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)